



GRPro2.1 コンソールユニットクイック・スタート・ガイド

操作方法

【STEP1】氷と水を準備し、アイスボックスを開けます。

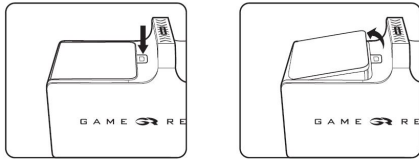


【STEP2】水をラインまで入れて、氷で満たします。

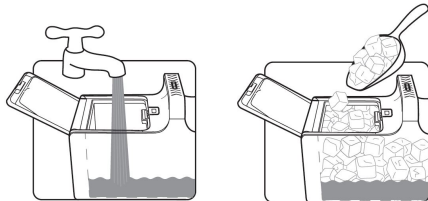

注) デュアルホース(別売)を使用する際には、水の量を設定値の2倍してください。

【STEP3】アイスボックスのドアを閉めます。


※カチッと音が聞こえることを確認します。

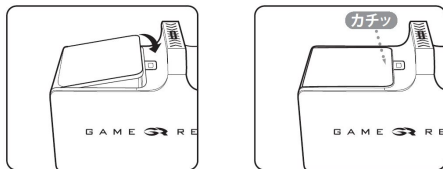

【STEP4】コントロールユニットを平らな場所に置きます。


【STEP5】電源をコンセントに接続します。

※コンセントに接続するとコントロールユニット上の電源インジケータライト(オレンジ色)が点灯します。

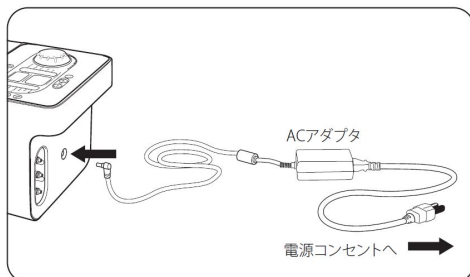

【STEP6】コネクタホースを接続します。


※両脚/両腕などに使用する際にはデュアルホース(別売)が必要です。

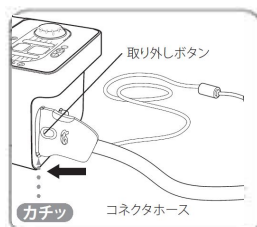

【STEP7】選択したラップを用意します。

※ラップの詳細はカタログ等を参照してください。

【STEP8】コネクタホースをラップに接続します。

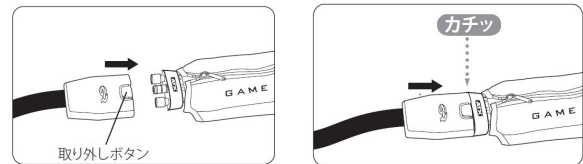


【STEP9】電源ボタンを押します。



【STEP10】温度ノブを回して目標温度(1~10℃)を設定します。

※起腫したらシステムを最低2分間作動させます。

使用前に圧力なしでラップをプライミングすることが重要です。

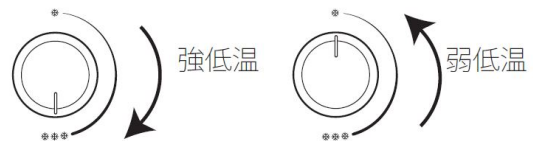


【STEP11】モードを選択(マニュアルかプログラム)します。

※ デフォルトはマニュアルモードです。

[マニュアル (Manual)モード]

1) +/- ボタンでタイマー時間(±5分)を設定

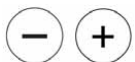

2) 圧力ボタンで圧力を設定

【オフ(Off)/低(Low)/中(Med)/高(High)】



[プログラム (Program)モード]

プログラムボタンを押して、好みのプログラム(6種類)を選択します。



※ドレインモードは、コンソールユニットから専用ドレインホース(別売)を使用して水を排出します。

【STEP12】開始/停止ボタンを押します。



[プログラム内容]

	作動	休止	圧迫		
			無	低	中
1	30分	30分			
2	30分	30分			
3	30分	30分			
4	30分	60分			
5	30分	60分			
6	30分	60分			


圧迫・低:5-15 mmHg、4-5 分加圧、1 分減圧

圧迫・中:5-50 mmHg、2-3 分加圧、1 分減圧

圧迫・高:5-75 mmHg、2-3 分加圧、1 分減圧

GRPro2.1 コンソールユニットクイック・スタート・ガイド

GAME READY GRPro2.1システム

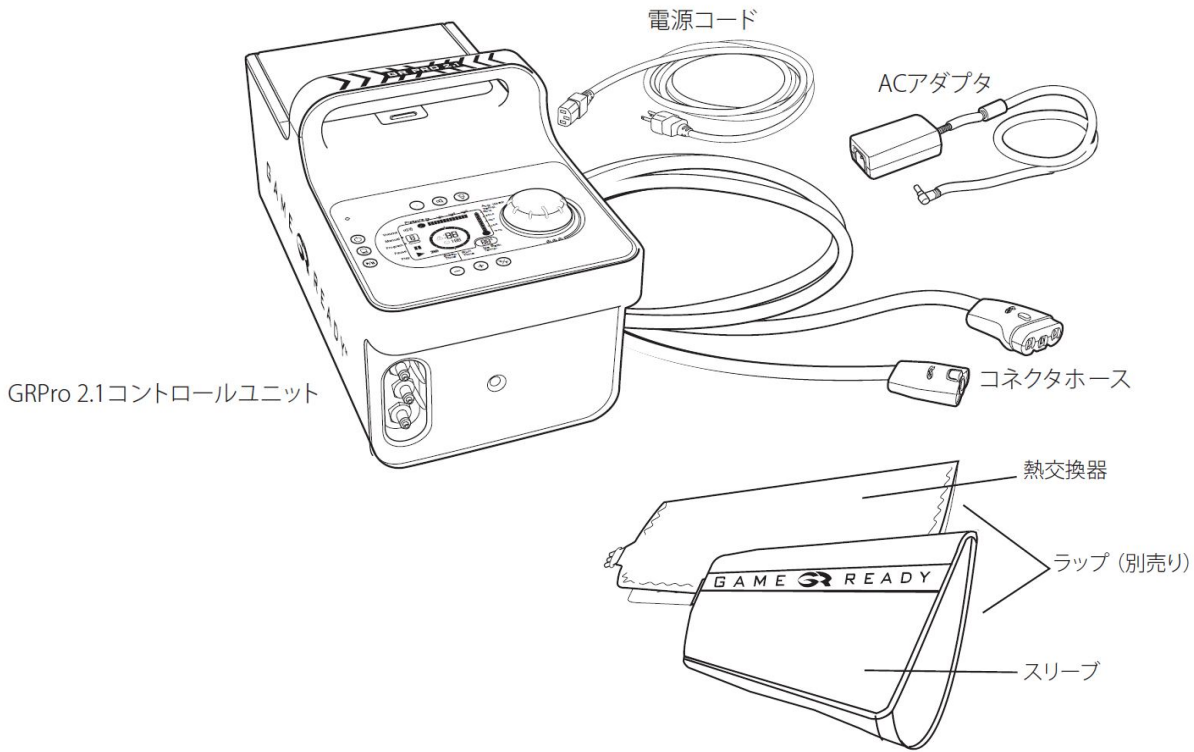

コントロール・パネル

